



Manu Advance

Optimal anvendelse

Med sit helt oplukkelige wraparound-design gør Exos Manu Advance termoformbar immobilisering ved større håndledsskader endnu nemmere.

Exos Manu Advance er indiceret til behandling af håndled:

- For at yde støtte og beskyttelse ved større håndledsskader
- Til behandling af frakturer, der kræver immobilisering og stabilitet

Indikationer der kræver immobilisering, støtte og stabilisering af håndled og distale underarm: • Håndledsfrakturer (fx ikke-operativ behandling af displacerede distale radiusfrakturer) • Posttraumatiske perioder • Konservativ, præoperativ og postoperativ pleje

Fordele og egenskaber

- Nem at anbringe – helt oplukkeligt design med velcrobånd, der kan vikles omkring patientens arm for en mere bekvem og komfortabel tilpasningsproces
- Opvarm, tilpas, gentag – bliver bøjelig efter fem minutters opvarmning i Exos®-ovnen for en støttende ergonomisk tilpasning. Kan opvarmes og formes igen for at fremme helingsprocessen og reducere spild
- Nem at justere og fastlåse – ortosens intuitive Boa®-lukkesystem gør, at den kan strammes præcist, er nem at lukke op og fastlåse sikkert, når der er behov for det
- Nem at tage af – muliggør undersøgelse, hurtigere rehabiliteringsterapi, rengøring af hud og ortose, og den kan fjernes uden brug af sav

Bestillingsinformationer

Manu Advance		
Varenummer		Størrelse
Venstre	Højre	
329-31-1111	329-32-1111	XS
329-41-1111	329-42-1111	S
329-51-1111	329-52-1111	M
329-61-1111	329-62-1111	L
329-71-1111	329-72-1111	XL

Fås kun i sort.

Størrelsesoversigt

Exos' måletape vikles rundt om håndfladen for at måle størrelsen.



Størrelse	Mål
XS	18,5 – 20 cm
S	20 – 23 cm
M	23 – 25,5 cm
L	25,5 – 28 cm
XL	> 28 cm