

Perform'Ice Knee

Ginocchiera articolata per la Terapia del Freddo & Compressione



Indicazioni

- Uso post-trauma e post-operatorio, ideale per trattare il ginocchio dove sia necessaria la stabilizzazione articolare unita alla terapia del freddo e compressione
- Lesione legamentosa, traumi meniscali, dolore anteriore del ginocchio, altri traumi al ginocchio
- uso post-operatorio: dopo artroscopia, ricostruzione legamentosa, trattamento alla rotula, osteotomia, protesi parziale o totale di ginocchio

Terapia del Freddo & Compressione

- L'applicazione della terapia del freddo e compressione aiuta a ridurre l'infiammazione, il dolore e il gonfiore
- **Dopo un trauma: Protocollo RICE**
 - Nel post trauma in acuto si applica il protocollo RICE: Riposo, Ghiaccio, Compressione, Elevazione per ridurre l'edema, il gonfiore, il dolore e per accelerare la guarigione del paziente
- **Nel post-operatorio**
 - Nel post-operatorio Compressione e Terapia del Freddo applicate immediatamente, hanno un effetto analgesico e antinfiammatorio riducendo il sanguinamento e il gonfiore

* RICE: Rest, Ice, Elevation, Compression

Vantaggi & Benefici

Comfort elevato

- Struttura aperta frontalmente per facilitare l'applicazione
- L'accessorio per il freddo si adatta a ogni gamba

Aste con snodo policentrico bilaterale

- Aste bilaterali in alluminio rimovibili con snodo policentrico
- Forniscono stabilità mediale e laterale
- Le aste si rimuovono quando il trattamento richiede solo il supporto per il trattamento del freddo e la compressione

Perform'Ice Freddo & Compressione

- Il supporto è fornito con 2 pacchi GEL, uno da mantenere in congelatore pronto all'uso
- Dopo 4 ore il pacco GEL è raffreddato, la durata dell'effetto freddo del GEL varia fra 20 - 30 minuti
- Il pacco GEL è malleabile, rivestito con soffice tessuto per un elevato comfort del paziente



Terapia del Freddo & Compressione

La confezione della ginocchiera contiene:

- **2 pacchi GEL** per il freddo
- **Manicotto gonfiabile** per la compressione da abbinare al freddo
- **1 pompa manuale** per gestire il grado di compressione
- **Aste con snodo rimovibili** per fornire supporto mediale e laterale
- **Sacca igienica di protezione** per il pacco Gel con identificazione del paziente

Facile applicazione

- La ginocchiera si applica facilmente con due fasce di chiusura a strappo
- Le fasce consentono una perfetta aderenza all'arto
- Misura XL per gamba con ginocchio voluminoso

Disponibile in

- 2 taglie: Standard e XL, ambidestro
- Lunghezza della ginocchiera 33 cm

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Codice	Descrizione	Taglia	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)
82-0015	Perform'Ice Knee	Standard	33 cm - 60 cm
82-0020	Perform'Ice Knee	XL	61 cm - 81 cm



DJO Italia srl | via Leonardo da Vinci, 97 | 20090 Trezzano Sul Naviglio | Milano | ITALIA

Tel: +39 02 835 98001 | +39 02 484 63386 | 800 891607 | Fax: +39 02 48409217 | email: vendite@DJOglobal.com

www.DJOglobal.it