

1



2



2



3



3



FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR POUR LEQUEL L'ATTELLE A ÉTÉ CONÇUE

Le dispositif s'adresse à un médecin autorisé, le patient, l'aide-soignant ou un membre de la famille qui prodigue les soins au patient. L'utilisateur doit être capable de :

- Lire, comprendre et être physiquement apte à respecter toutes les consignes, les avertissements et les précautions qui figurent dans le mode d'emploi.

UTILISATION / INDICATIONS

- Utilisation post-traumatique, pré- ou post-opératoire, réadaptation fonctionnelle, reprise d'activité.
- Lésions modérées du LCA/LCP, lésions modérées à graves des ligaments latéraux (LLI, LLE), lésions méniscales, chirurgie du genou.

CONTRE-INDICATIONS

Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Nous recommandons qu'un professionnel de santé supervise la première application.
- En cas de douleur, gonflements, modifications des sensations ou toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

L'attelle est munie de 2 articulations latérales bloquées en extension et d'une baleine postérieure amovible située au niveau du creux poplité. Cette baleine est préformée, mais peut aussi être modelée selon les besoins du patient, ou retirée.

Patient allongé sur le dos, ouvrir l'attelle.

1 - Positionner la jambe du patient sur l'attelle, le genou centré entre les 2 articulations latérales. Refermer la bande anti-glissement sur le mollet à l'aide des fermetures auto-agrippantes.

2 - Fermer l'attelle au niveau de la cuisse et du mollet à l'aide des fermetures auto-agrippantes.

3 - Ajuster les 4 sangles à la longueur désirée et les fermer à l'aide des boucles (clips) de fermeture. Ajuster le serrage en fonction du niveau de compression souhaité.

Articulations

- Pour régler la flexion/extension, ouvrir le couvercle de chacune des articulations, placer les plots à l'angle souhaité, puis refermer le couvercle de l'articulation.
- Pour éviter d'endommager les articulations les positions des plots de flexion et d'extension doivent être identiques sur les deux articulations.

ENTRETIEN

- Laver à la main à l'eau tiède (30°C) à l'aide d'un détergent doux
- Laisser sécher à l'air libre (ne pas placer sur un radiateur ou une autre source de chaleur)
- Ne pas utiliser de javel ou de chlore, et ne pas repasser.

COMPOSITION

Aluminium, polyester, polyamide, mono filament, polyuréthane, coton, élastomère, résine caoutchouc, acetal (POM), polypropylène, polyéthylène



NON FABRIQUÉ AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.

DONJOY®